

剥がす!

強カツインモード

強力な剥離効果と溶解力を持つ  
ツインモードのトレークリーナーです。


防錆成分配合により、  
金属トレーの腐食を防ぎます。

除菌成分が溶液を清潔に保ちます。

溶かす!

使う人にやさしい  
(pH=7)

中性  
タイプ

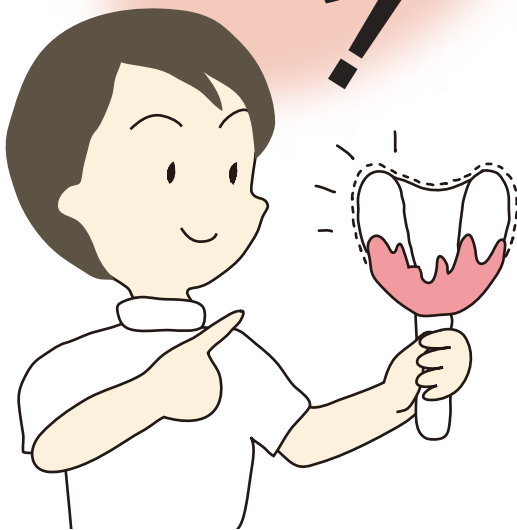

防錆・除菌効果にも優れた  
液体トレークリーナーです。  
ニュートレークリーナーリキッド



NET 2.0L (減容化容器)  
2,900円 (税別・希望小売価格)

アルギン酸塩印象材用清掃液

# New Tray Cleaner Liquid

ニュートレークリーナーリキッド

第4級アンモニウム塩配合

# New Tray Cleaner Liquid

アルギン酸塩印象材用清掃液

ニュートレークリーナーリキッド

第4級アンモニウム塩配合 印象材を短時間で剥がす! 浸漬して溶かす!  
目的によって使い分けのできるトレークリーナーです。  
使う人にやさしい中性タイプ(pH=7)です。

## ニュートレークリーナーリキッドの特長

剥離効果と溶解力で  
印象材をキレイに除去します。



原液に1時間浸漬



10倍希釈液に12時間浸漬

防錆成分配合により  
各種金属トレーの腐食を防ぎます。



10倍希釈液に1週間連続使用

除菌成分が  
溶液を清潔に保ちます。



印象材浸漬液をフィルム培地で検査

### 使用方法

- 1.フタ付きのガラス又はポリ容器に溶液を調整します。
- 2.剥がす時は原液に印象材の付いたトレーを30分～1時間浸漬します。
- 3.溶かす場合は5～20倍に希釈した溶液に数時間～1日浸漬後取り出し、軟化残存する印象材はブラシ等で除去します。
- 4.液の交換は一週間を目安とし、溶解力が低下した時に全量交換してください。

### 使用上の注意

- ・長時間トレーを浸漬すると、耐腐食性に劣る金属などは変色する場合があります。
- ・作業時は保護メガネおよび炊事用ゴム手袋を着用してください。
- ・他の薬剤、洗浄剤とは混ぜないでください。
- ・用途以外には使用せず、子供の手の届かないところに直射日光を避けて保管してください。

〈製造販売元〉High Technology & Sincerity

⊗ 太平化学産業株式会社

本 社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241  
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル5F TEL.03-6206-2203  
URL <http://www.taihei-chem.co.jp/>